

# 使用说明书

## 品名 一次性使用无菌胰岛素注射器 带针

技术要求编号：

注册证编号：

企业许可证：粤食药监械生产许20010467号

结构和规格

外套 (PP料)、推筒 (PP料)、回缩装置 (PP料)、顶塞 (PP料)、防液圈 (硅胶)、活塞 (硅胶)、针管 (304不锈钢)、针座 (PP料)、前护套 (PE料)、弹簧 (304不锈钢)、后护套 (PE料) 11件组成。

产品规格：U-100、U-40

公称容量：0.5ml、1ml

| 产品规格  | 配针规格                         |             |             |             |             |             |
|-------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       | 0.45×13RWLB                  | 0.45×16RWLB | 0.45×20RWLB | 0.4×13RWLB  | 0.4×16RWLB  | 0.4×20RWLB  |
| 0.5ml | 0.36×13RWLB                  | 0.36×16RWLB | 0.36×20RWLB | 0.33×13RWLB | 0.33×16RWLB | 0.33×20RWLB |
|       | 0.3×6RWLB                    | 0.3×13RWLB  | 0.3×16RWLB  | 0.25×8RWLB  | 0.25×13RWLB | 0.25×16RWLB |
|       | 0.45×13RWLB                  | 0.45×16RWLB | 0.45×20RWLB | 0.4×13RWLB  | 0.4×16RWLB  | 0.4×20RWLB  |
| 1ml   | 0.36×13RWLB                  | 0.36×16RWLB | 0.36×20RWLB | 0.33×13RWLB | 0.33×16RWLB | 0.33×20RWLB |
|       | 0.3×6RWLB                    | 0.3×13RWLB  | 0.3×16RWLB  |             |             |             |
|       |                              |             |             |             |             |             |
| 备注    | 管壁类型：RW (正常壁)；刃角角度：LB (长斜面角) |             |             |             |             |             |

## 性能和特点

- 无菌、无热原。
- 单手操作。
- 环氧乙烷灭菌。
- 针管回缩后，对病人和医护人员无害 (针头从体内直接回缩)。
- 注射针自动回缩后，针管不外露。









## 用途与范围

抽吸胰岛素药液后注射于糖尿病患者皮下。

## 使用说明

临床医生应熟知使用说明，并经临床注射部门培训。正确使用步骤如下：

1. 打开包装，将护套从针管上取下，并将后护套从推筒上取下 (图1)。
2. 将注射针插入药液瓶内，抽吸药液至筒身内 (图2)。
3. 排出筒内气泡后进行注射。缓慢注射 (图3)。
4. 将推筒推到底，完成注射后，针管将自动回缩 (图4)。

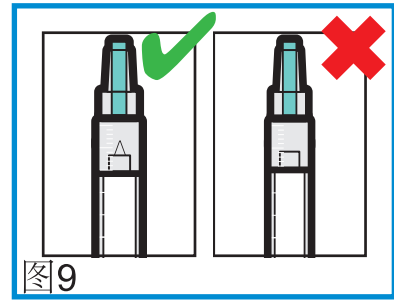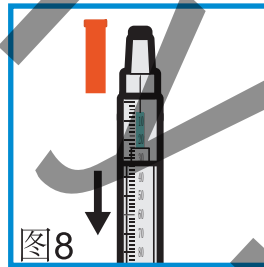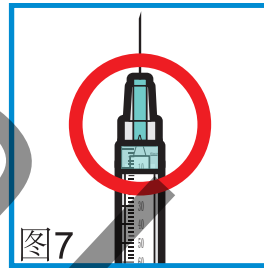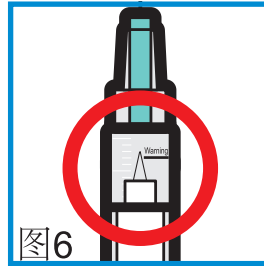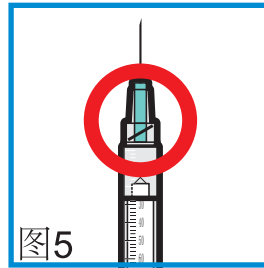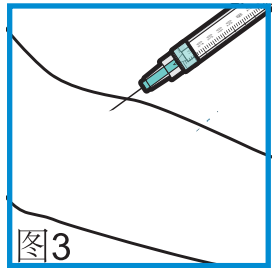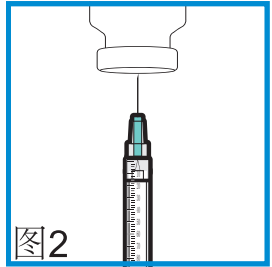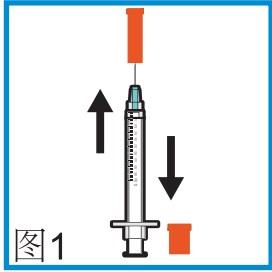


## 注意事项

1. 使用前请阅读“使用说明”部分。
2. 包装破损或护套脱落切勿使用。
3. 在取下包装之前，注射器是无菌的，仅供一次性使用。
4. 使用前，请仔细检查推筒前端是否带卡勾，若无卡勾，请勿使用 (图9)。
5. 当抽液进注射器时请勿用力过猛，用力过猛可能会使O型圈移位，使针管不会回缩 (图5)。
6. 注射前，请勿将推筒推过“警戒线” (图6)。
7. 请缓速注射。注射速度过快可能使O型圈移位或导致针管不会回缩。
8. 在药液或液体完全注射完的同时，安全特性才能被激活 (如药液或液体未被完全注射干净，针管不会自动回缩) (图7)。
9. 如果在药液或液体完全注射完后针管会自动回缩，请与普通胰岛素注射器一样，用手拔出针管，并将推筒拉回至针管在筒身内，然后套上护套 (图8)。

## 标识

1. 一次性使用
2. 环氧乙烷灭菌
3. 无菌

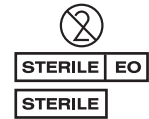

## 贮存要求：

本产品应贮存在无腐蚀气体、通风良好的室内。

生产日期：详见产品单包装、中包装、外包装标签。  
失效日期：生产日期之日起三年。

注册人、生产企业、售后服务单位：汕头华尔怡医疗器械有限公司  
注册人住所、生产地址、售后服务单位地址：广东省汕头市金环北路 (岐山中学路段)  
邮编：515064  
电话：0754- 82121370 82121746  
传真：0754- 82121654